



### ***Le scotch test ou test de Graham***

#### **Intérêt :**

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons et des troubles du sommeil.

#### **Matériel :**

- Dispositif fourni par le laboratoire (lame porte objet, ruban adhésif transparent, boîte de transport de lame)

#### **Conditions de prélèvement :**

- Le scotch test doit s'effectuer le matin avant la toilette et avant toute émission de selles
- Décoller le ruban adhésif de la lame et l'appliquer aux abords de la marge anale, maintenir en appuyant quelques secondes.
- Recoller le ruban sur la lame support.
- Renouveler l'opération une seconde fois.
- Replacer les 2 lames dans le support.
- Identifier avec nom, prénom, date de naissance.
- Acheminer rapidement au laboratoire à température ambiante (<12h).